

<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	MASCARILLAS FFP2 NR - MFRADEx003G
<b>FABRICANTE</b>	GRAFOPLÁS DEL NOROESTE, S.A.
<b>PRODUCTO</b>	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA ANTIPARTÍCULAS AUTO-FILTRANTE DESECHABLE (FFP2 NR)
<b>REFERENCIA</b>	85005210 (Negro) 85005270 (Blanco) 85005232 (Azul Oscuro) 85005254 (Fucsia) 85005274 (Gris Oscuro)
<b>COLORES</b>	NEGRO - BLANCO - AZUL OSCURO - FUCSIA - GRIS OSCURO
<b>COMPOSICIÓN</b>	- Capa EXTERIOR: Nonwoven Spunbond NEGRO, BLANCO, AZUL OSCURO, FUCSIA O GRIS OSCURO - Capa INTERIOR: Nonwoven Spunbond BLANCO - Capa INTERMEDIA: Hot Cotton - Capa INTERMEDIA: Meltblown (x2) - Sujeción GOMAS: Face Mask Straps 4 mm color NEGRO, BLANCO, AZUL OSCURO, FUCSIA o GRIS OSCURO - Ajustador NASAL: Mask Bone 5 mm  Libre de GRAFENO
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Equipo de protección respiratoria no reutilizable (tipo FFP2) Eficacia de filtración 97%
<b>PRESENTACIÓN</b>	Envase 25 unidades (embolsado unitario)
<b>ENVASE</b>	Envase folding reverso blanco 325gr
<b>CONSERVACIÓN</b>	Conservar en ambiente seco y fresco
<b>INDICACIONES</b>	No usar si el envase está dañado No reutilizar Instrucciones de uso: 1. Lavarse las manos con agua y jabón antes de manipular la mascarilla 2. Sujetar la mascarilla por las gomas de ajuste con las dos manos con la parte convexa hacia la cara 3. Colocar sobre la barbilla y ajustar las gomas a las orejas 4. Adaptar la pinza nasal 5. Colocar las manos sobre la mascarilla, exhalar con fuerza y comprobar que no haya fugas de aire 6. Comprobar de nuevo el ajuste 7. Mantener la mascarilla puesta durante todo el periodo de exposición
<b>FOTO</b>	
<b>PROCESO DE FABRICACIÓN</b>	Máquina automática de conformado y soldadura por ultrasonidos. La materia prima se desbobina mediante juego de rodillos que unen las capas de los diferentes materiales y donde se añade el refuerzo nasal. Posteriormente se realiza una primera soldadura por ultrasonidos con los contornos de la mascarilla. A continuación se realiza una soldadura por ultrasonidos para colocar las gomas de sujeción. Una vez soldadas las gomas, las mascarillas se pliegan mediante rodillos para finalmente troquelarlas. Se embolsan unitariamente y se empaquetan en envases de 25 unidades.