

NOMBRE COMERCIAL	MASCARILLAS FFP3 NR - MFR001G
FABRICANTE	GRAFOPLÁS DEL NOROESTE, S.A.
PRODUCTO	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA ANTIPARTÍCULAS AUTO-FILTRANTE DESECHABLE (FFP3 NR)
REFERENCIA	85005370 / 85005470
COLORES	BLANCO
COMPOSICIÓN	- Capa EXTERIOR: Nonwoven Spundbond BLANCO - Capa INTERIOR: Compuesto de Nonwoven Spundbond y Meltblown BLANCO - Capa INTERMEDIA: Meltblown - Sujeción GOMAS: Face Mask Straps 4 mm color BLANCO - Ajustador NASAL: Mask Bone 5 mm Libre de GRAFENO
DESCRIPCIÓN	Equipo de protección respiratoria no reutilizable (tipo FFP3) Eficacia de filtración 99%
PRESENTACIÓN	Envase 10 unidades (embolsado unitario) / Envase 20 unidades (embolsado unitario)
ENVASE	Envase folding reverso blanco 325gr
CONSERVACIÓN	Conservar en ambiente seco y fresco
INDICACIONES	No usar si el envase está dañado No reutilizar Instrucciones de uso: 1. Lavarse las manos con agua y jabón antes de manipular la mascarilla 2. Sujetar la mascarilla por las gomas de ajuste con las dos manos con la parte convexa hacia la cara 3. Colocar sobre la barbilla y ajustar las gomas a las orejas 4. Adaptar la pinza nasal 5. Colocar las manos sobre la mascarilla, exhalar con fuerza y comprobar que no haya fugas de aire 6. Comprobar de nuevo el ajuste 7. Mantener la mascarilla puesta durante todo el periodo de exposición
FOTO	
PROCESO DE FABRICACIÓN	Máquina automática de conformado y soldadura por ultrasonidos. La materia prima se desbobina mediante juego de rodillos que unen las capas de los diferentes materiales y donde se añade el refuerzo nasal. Posteriormente se realiza una primera soldadura por ultrasonidos con los contornos de la mascarilla. A continuación se realiza una soldadura por ultrasonidos para colocar las gomas de sujeción. Una vez soldadas las gomas, las mascarillas se pliegan mediante rodillos para finalmente troquelarlas. Se embolsan unitariamente y se empaquetan en envases de 10 ó 20 unidades.