

<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	MASCARILLAS FFP2 NR - MFRADEx003G
<b>FABRICANTE</b>	GRAFOPLÁS DEL NOROESTE, S.A.
<b>PRODUCTO</b>	EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA ANTIPARTÍCULAS AUTO-FILTRANTE DESECHABLE (FFP2 NR)
<b>REFERENCIA</b>	85005210 (Negro) 85005270 (Blanco) 85005232 (Azul Oscuro) 85005254 (Fucsia) 85005274 (Gris Oscuro)
<b>COLORES</b>	NEGRO - BLANCO - AZUL OSCURO - FUCSIA - GRIS OSCURO
<b>COMPOSICIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capa EXTERIOR: Nonwoven Spundbond NEGRO, BLANCO, AZUL OSCURO, FUCSIA O GRIS OSCURO</li> <li>- Capa INTERIOR: Nonwoven Spundbond BLANCO</li> <li>- Capa INTERMEDIA: Hot Cotton</li> <li>- Capa INTERMEDIA: Meltblown (x2)</li> <li>- Sujeción GOMAS: Face Mask Straps 4 mm color NEGRO, BLANCO, AZUL OSCURO, FUCSIA o GRIS OSCURO</li> <li>- Ajustador NASAL: Mask Bone 5 mm</li> </ul> <p>Libre de GRAFENO</p>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Equipo de protección respiratoria no reutilizable (tipo FFP2) Eficacia de filtración 97%
<b>PRESENTACIÓN</b>	Envase 25 unidades (embolsado unitario)
<b>ENVASE</b>	Envase folding reverso blanco 325gr
<b>CONSERVACIÓN</b>	Conservar en ambiente seco y fresco
<b>INDICACIONES</b>	<p>No usar si el envase está dañado No reutilizar Instrucciones de uso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lavarse las manos con agua y jabón antes de manipular la mascarilla</li> <li>2. Sujetar la mascarilla por las gomas de ajuste con las dos manos con la parte convexa hacia la cara</li> <li>3. Colocar sobre la barbilla y ajustar las gomas a las orejas</li> <li>4. Adaptar la pinza nasal</li> <li>5. Colocar las manos sobre la mascarilla, exhalar con fuerza y comprobar que no haya fugas de aire</li> <li>6. Comprobar de nuevo el ajuste</li> <li>7. Mantener la mascarilla puesta durante todo el periodo de exposición</li> </ol>
<b>FOTO</b>	
<b>PROCESO DE FABRICACIÓN</b>	<p>Máquina automática de conformado y soldadura por ultrasonidos. La materia prima se desbobina mediante juego de rodillos que unen las capas de los diferentes materiales y donde se añade el refuerzo nasal. Posteriormente se realiza una primera soldadura por ultrasonidos con los contornos de la mascarilla. A continuación se realiza una soldadura por ultrasonidos para colocar las gomas de sujeción. Una vez soldadas las gomas, las mascarillas se pliegan mediante rodillos para finalmente troquelarlas. Se embolsan unitariamente y se empaquetan en envases de 25 unidades.</p>

<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Reglamento (UE) 2016/425</b> del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo</li><li>● <b>Norma EN 149:2001 + A1:2009</b> Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayo, marcado.</li><li>● <b>Declaración UE de Conformidad</b> Ed.6 de fecha 26/07/2022</li></ul>
---------------------------------	--